


# CowMotion


CowMotion lässt sich schnell und unkompliziert an die Rinderklaue anbringen. Dafür haben wir einen speziellen Klebstoff entwickeln lassen, der sowohl eine hochfeste aber gleichzeitig flexible Verbindung zwischen Klauenhorn und Orthese ermöglicht. Die Verarbeitungszeit beträgt je nach Temperatur zwischen 60-120 Sekunden, die Aushärtung benötigt zusätzlich nochmal 120-310 Sekunden.

**Hinweis!** CowMotion sollte allerdings immer erst nach einer regulären Klauenpflege eingesetzt werden.


## Anleitung

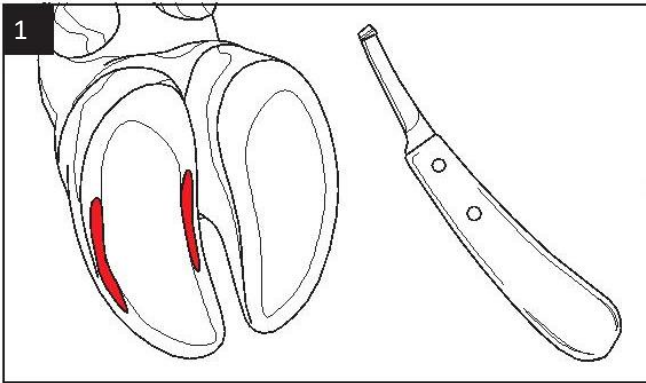


1. Klauenpflege durchführen.

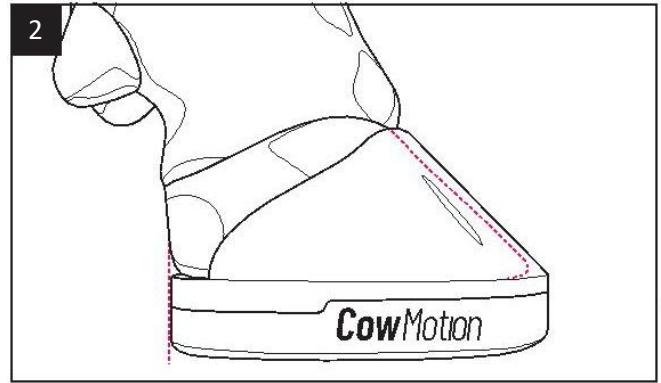


2. Orthese testweise auf die Klaue aufziehen. Klaue sollte möglichst bündig anschließen.

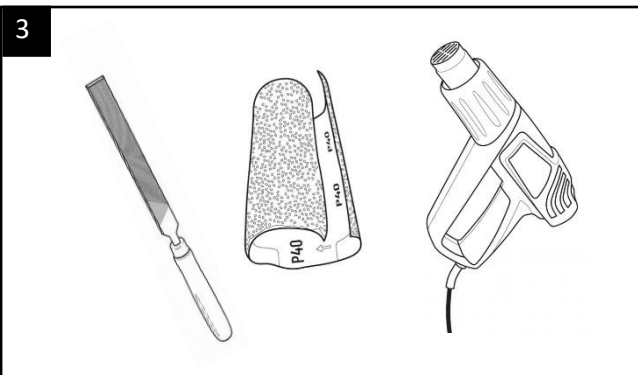

3. Die Klauenwand mit einer Raspel anrauen, die Orthese mit dem Sandpapier in der Kappe anrauen. Bei Bedarf beides trocknen mit einem Heißluftfön.

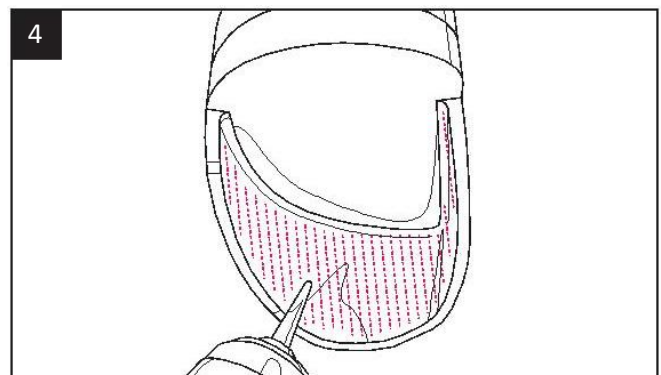

4. Die Orthese mit der Spitze nach unten zeigend in der Hand halten (Kappe zeigt zur Person). Den Kleber nur in die gesamte Kappe auftragen (aufsteigend von Kappenspitze bis Kappenecke).

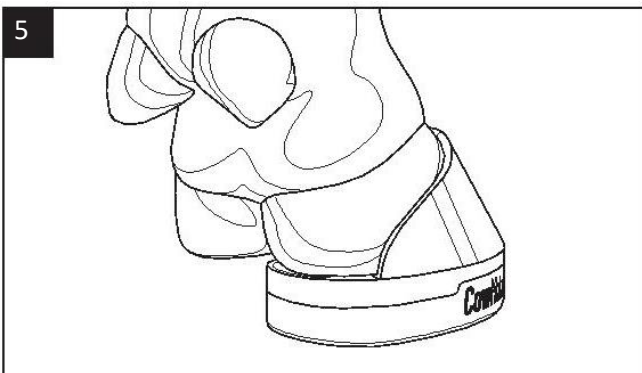

5. CowMotion sofort auf die Klaue anbringen und an der Position halten bis der Kleber handfest ist. (Regulär ist die Orthese nach ca. 5 Minuten komplett belastbar, bitte die Hinweise des verwendeten Klebstoffes und die Temperatur beachten!)



# CowMotion

## CowMotionHoof Glue

Anwendungshinweise:

**CowMotion Hoof Glue**, schwarz, 10:1, 50ml Kartusche

Für hochfeste, strukturelle und zugleich flexible, beständige Klebeverbindungen

Geschwindigkeit:	Langsam
Verarbeitungszeit:	60-120 Sekunden*
Aushärtezeit:	120-310 Sekunden*
Konsistenz:	Dickflüssig
Wintertauglichkeit:	Durch temperieren. Dies kann durch Einlegen in warmes Wasser oder durch Positionierung der Kartusche in Körperrnähe (z.B. Brusttasche) erfolgen.
Sommertauglichkeit:	Optimal
Lagertemperatur:	2 bis 20°C
Verarbeitungstemperatur:	16 bis 30°C, unter 16°C muss der Kleber aufgewärmt werden
Warmhaltebox:	34- 37 °C
Haltbarkeit:	9 - 12 Monate
<b>CowMotion</b> Orthese:	Ideal
Mischkanülen:	Standard Mischer

\*Abhängig von der Verarbeitungstemperatur und vor allem von der Kerntemperatur des Klebstoffes.

**Hinweis!** Der **CowMotion Hoof Glue** härtet langsam aus, hat eine dickflüssige Konsistenz und ist ideal für den **CowMotion Orthese**. Im Sommer bedenkenlos einsetzbar. **Im Winter muss zwingend auf korrekte Lager- und Verarbeitungstemperatur geachtet werden.**



# CowMotion

## CowMotionHoof Glue

### CowMotion Hoof Glue

MMA ADHESIVE

**MULTI CRAFT  
BLACK**

Für hochfeste, strukturelle  
und zugleich flexible,  
beständige Klebeverbindungen

DE: Verarbeitungszeit: 1 - 2 min. Fixierzeit: 2 - 3,5 min. Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C. Nach Verarbeitungszeit Produkt ruhen lassen, um Aushärtprozess nicht zu beeinträchtigen. Nach 24 h durchgehärtet. Die Zeiten beruhen auf einem Temperaturwert von ca. 24 °C. Die Verarbeitungszeit wird bei erhöhter Temperatur verkürzt und bei niedrigerer Temperatur verlängert. Mindestspalt nach Fügen: 1 mm. Kühl und trocken lagern. Geöffnete Behälter schnell verbrauchen. Bitte beachten Sie unbedingt die Angaben und Hinweise unserer Sicherheits- sowie technischen Datenblätter.

**Adhesive:** Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLÜCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Enthält: Methylmethacrylat; Methacrylsäure; 2-Dimethylaminoethylmethacrylat; 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, reaction products with phosphorus oxide; Kolophonium

UFI: VHR0-00T8-S00F-A5G4

**Gefahr**

**Activator:** Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Enthält Dibenzoylperoxid und Dibutylmaleat.

UFI: 5ER0-H03V-F00X-NTW2

**Achtung**

Hersteller:

**wiko**  
WIKO Klebetechnik Sp. z o.o.  
ul. Ekonomiczna 8 · 42-271 Częstochowa · Poland  
Tel.: +48 34 37258-58  
[www.gluetec-group.com](http://www.gluetec-group.com)

**50 ml / 50 g**

**Storage:**  
+2 °C to +23 °C



Batch:

[cowmotion.de](http://cowmotion.de)

V01\_1122

